

PARA HACER PEDIDOS

Si usted necesita pedir más clips, cuestan \$9.00 por tres.
Comuníquese con Ideas for Living, Inc. al (800) 497-6573.

GARANTÍA Y POLIZA DE DEVOLUCIÓN

El Potty Pager trae una garantía de devolución de dinero por 30 días (se excluyen las pilas y flete). Se tiene que devolver en el transcurso de 30 días después de ser entregado. Para devoluciones, basta enviarlo de nuevo con el correo prepagado a:

Ideas for Living, Inc.
1285 N. Cedarbrook Rd.
Boulder, CO 80304

Si usted pagó con tarjeta, éste se le acreditará en cuanto recibamos su devolución. Favor de permitir dos ciclos de envíos de cuenta para que aparezca en su relación del crédito. Si pagó con cheque o giro, se le enviará un reembolso.

Nosotros **ni expedimos devoluciones ni reponemos** mercancía que no se adquirió de Ideas for Living.

Mercancía que fue adquirido en su farmacia **debe ser devuelta a su farmacia** para reembolso o para reponerla. Se le avisa que no podemos ser responsables para devoluciones de su parte y tampoco de su política al respecto.

POLIZA DE GARANTÍA


Ideas for Living, Inc. certifica al cliente original que adquiere el Potty Pager que éste será libre de defectos en sus materiales y terminación por 90 días a partir del día en que se compre. De ser defectuoso, regrese al producto junto con su comprobante de pago, el correo prepagado, para su reemplazo o devolución al acuerdo estipulado a:

Ideas for Living, Inc.
1285 N. Cedarbrook Rd.
Boulder, CO 80304

La garantía ni cubre gastos de envío ni las pilas. **Se le negará el regreso del dinero y la garantía si deja el Potty Pager en calzones mojados despues de despertar, lo cual causa que el motor se gaste.** Cualquier descompostura a raíz del mal uso, abuso u omisión de seguir estas instrucciones también hará que se anule estas garantías.

POTTY PAGER

INSTRUCCIONES PARA USAR SU NUEVO POTTY PAGER

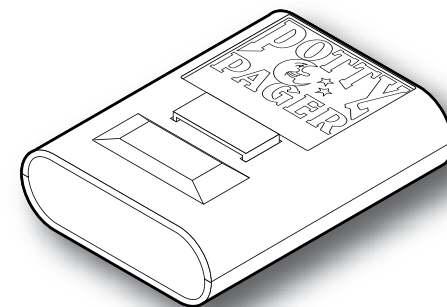

Para Niños y Niñas

Gracias por elegir el Potty Pager

El Potty Pager es una "alarma condicionada en respuesta a la enuresis", lo cual solo significa que le enseña a su niño que no moje la cama. Sirve al enterarle en el momento de iniciarse la mojada. Para que tenga éxito este programa, su hijo(a) tiene que desearlo, pero si la alarma lo(a) despierta aún estando mojado(a), estás encaminado al éxito y hay que mantenerse firme. No es una curación milagrosa, sino se requiere su tiempo y paciencia. Si despierta el Potty Pager a su hijo(a), ¡se podrá curar! Aunque solamente el 4% de aquellos(as) que mojan sus camas tengan un problema físico subyacente, acuda con su médico para descartarlo).

© 2008 Ideas for Living 10/08

IDEAS FOR LIVING , INC.
1285 N. CEDAR BROOK RD
BOULDER, CO 80304
TEL: (800) 497-6573
E-MAIL: INFO@POTTYPAGER.COM
HTTP://WWW.POTTYPAGER.COM


DATOS IMPORTANTES

- ◆ Se le debe fijar el clip a la tela. No basta que únicamente se le ponga el pager. Fijese en la foto.
- ◆ No deje que el pager le toque la piel.
- ◆ No usar el pull-up — que se ponga su calzón primero.
- ◆ Las niñas se vestirán de dos pares de calzones; no uno. Luego, se les pone uno por encima.
- ◆ Si el niño se acaba de dar un baño, es preciso que se seque por completo puesto que el Potty Pager fue diseñado a reaccionar ante lo más mínimo de humedad.
- ◆ Si se ve que se prende la alarma por la sudación, solo volteen el Potty Pager para que esté en contacto con la **capa exterior de la tela**. Para lograrlo, se le tiene que fijar el clip desde **adentro** del calzón.
- ◆ Si llegara a mojarse por dentro, quítese las pilas, enjuague el pager y permita que éste se seque.
- ◆ Para esterilizar el Potty Pager, se limpia con alcohol para frotar.
- ◆ Una vez que se despierta su niño(a), el (ella) debe sacar el Potty Pager de sus calzones mojados y reemplazar los con calzones secos. Dejando que el Potty Pager corra toda la noche adentro de calzones mojados constituye mal uso y hará que se anule estas garantías.
- ◆ Como son pequeños los clips y las pilas, manténganlos alejados de sus chicos.
- ◆ Para evitar un relapso de orinarse, use durante dos semanas hasta alcanzar la meta de mantenerse seco(a).
- ◆ Como se explica en las pilas, instalándolas al revés podrá causar sobrecalentamiento o fugas. Siempre coloque las pilas de acuerdo con el + / -, indicadores al fondo del pager.


CONTENDIO DEL PAQUETE



Potty Pager

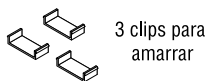

3 clips para amarrar

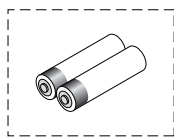


Pilas opcionales



Instrucciones, pólice de garantía y folleto

INSTALACIÓN DE PILAS


Al iniciarse, se requieren **dos pilas nuevas ENERGIZER LITHIUM tamaño AA**. Se consiguen en las tiendas Target, Walgreens, o Wal-Mart. Si no, las puede ordenar con nosotros directamente (ver instrucciones para pedidos). **No usar del tipo alkaline (que incluyen Duracel o Energizer) ni tampoco las recargables** debido a los casos aislados en los que hay fugas o se sobrecalientan. Por lo tanto, causan quemaduras.

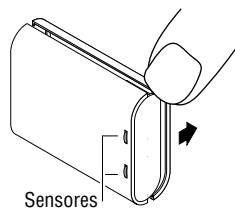

Sensores


Importante: Coloque de acuerdo con el + / -, indicadores al fondo del pager. Si corre sin parar, las dos pilas están al revés. Vuelva a meter la tapa.

Nota: Solamente cabe de una forma.

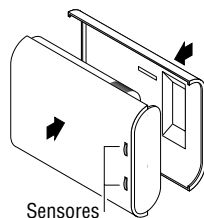

Sensores

Para abrir el pager, solo levante la tapa del pager por el filo (usando la uña del dedo para separar la tapa del pager).

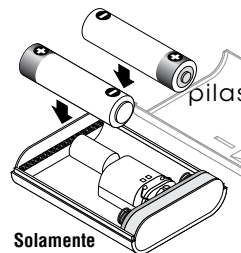

Solamente usar pilas Energizer Lithium

Para probar el pager, toque los dos sensores de cobre al dorso. Tal vez usted tenga que humedecer los picos de los dedos. La vibración se prende y se apaga en intervalos de segundos.

Vuelva a meter la tapa.


Nota: La tapa solamente cabe de una forma.

INSTRUCCIONES PARA SU USO


Ya llegó la hora para que sepa su hijo(a) como se va a sentir una vez que se active al pager cuando se moje. Que se levante su niño(a) inmediatamente cuando suceda esto, quite el pager y que visite el baño, para luego reemplazar el pager en un calzón seco. Si es muy pequeño(a), puede que se requiera de su asistencia de usted. Al ser mayor, debería de responsabilizarse de ello.

Para Niños

Se debería de colocar el pager justo por el cierre del calzón, el cual viene apretado y lavado. Este tipo de tela permite que la humedad se concentra hacia los sensores de cobre antes de filtrarse. Asegúrese que esté en su lugar con uno de los clips y que se atraviesa la tela. **Se debe utilizar** el clip o se meten los orines en el pager, **cosa que anula la garantía y pólice**. Se pueden levantar los clips con la uña del dedo. Los calzones tipo boxer no son recomendables al no ser absorbentes. No se moldean al cuerpo y no se estiran para aceptar el clip.

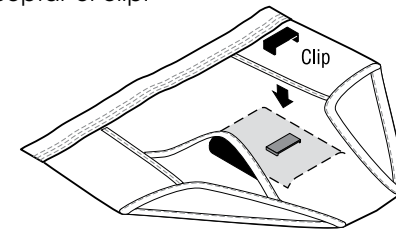

Para Niñas

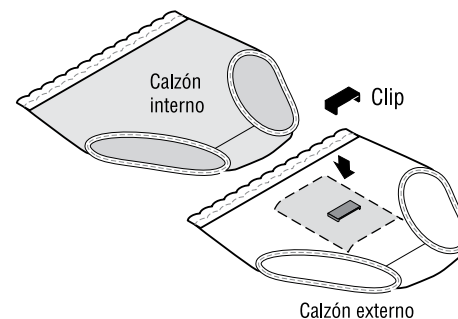

Al utilizar **dos** calzones de algodón, coloque el pager dentro de los dos pares de estos y esfuerce el clip a través de la tela para fijar el pager para que den **los sensores con la parte interior de la tela**. (Si quiere, usted puede emplear un calzón de niño. Ver instructivo de niño). En todo caso, se deberá de colocar el pager como se muestra con los sensores contra la **capa interior** de la tela para una respuesta más rápida.

Que no se toque el pager la piel; el sudor lo puede prender. Para percatar las primeras gotas de orina, deben estar los sensores dentro de dos o tres pulgadas de la salida de la uretra, lo cual indica una posición más debajo de lo que fuera en los niños. Si su niño actualmente lleva "pull-ups", éstos aún se pueden utilizar siempre que se pongan por encima de un calzón o calzoncillo.